



Principes d'entretiens
et règles de bons usages pour
le Cryo 7

DOCUMENT
PUBLIC

Afin de garantir une qualité de soin et une durée d'utilisation optimale, il est important d'entretenir rigoureusement votre matériel.


1 : Le dégivrage : Une fois par semaine, dans l'idéal avant la fermeture du week-end, et doit être réalisé le soir.

2 : Entretien du filtre : Une fois par semaine, aspiration de la grille arrière à l'aide d'un aspirateur. Aucun démontage de grille n'est nécessaire.

Pour le Cryo 7, le changement du filtre s'effectue après 1000 heures d'utilisation, soit environ 20 000 traitements.

→ En cas de doute, contactez le support technique Zimmer France.

Entretiens et révisions – Lancer le dégivrage

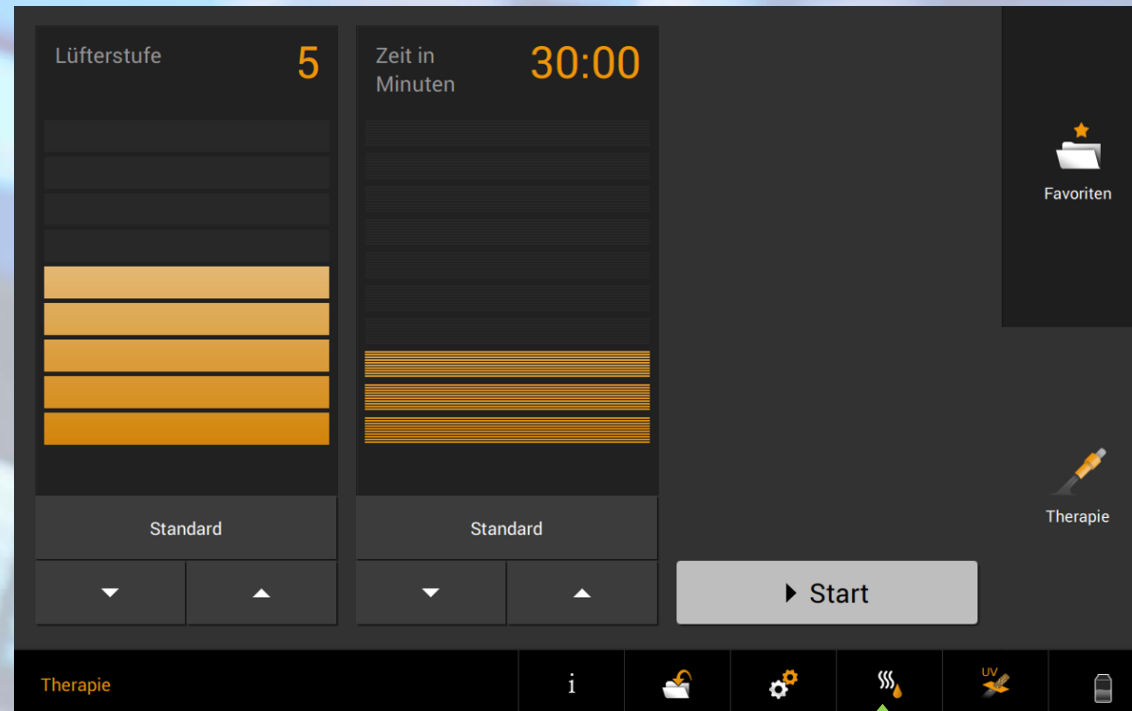

Durant le temps de dégivrage, vous pouvez commencer à ranger le cabinet pour préparer sa fermeture.

Cliquer sur le bouton dégivrage lancera le programme durant 5 à 10 minutes suivant l'usage fait en semaine.

Entretiens et révisions – Vider le réservoir d'eau



2

Presser le bouton.



3

Vider le bac, puis le replacer et fermer la trappe.



1

Repérer le bouton d'ouverture pour le bac à eau (en rouge sur la photo).



En cas d'oublis, le réservoir d'eau à vider sera signalé sur l'écran.

Entretiens et révisions – Nettoyer le filtre à air

Le filtre à air est à nettoyer avec un aspirateur chaque semaine.

Il vous suffira de venir aspirer la grille arrière du Cryo 7 en moins de 30 secondes.

L'opération ne nécessite aucun démontage.




Une alerte pour le changement de filtre apparaîtra à partir de 700h d'utilisation.

Une fois 1000h d'utilisation (environ 20 000 traitements !), le changement de filtre s'effectuera simplement sans outillage.

**EN CAS DE DOUTES VEUILLEZ CONTACTER SISSEL FRANCE
02.40.16.98.76 ou par mail : sissel@sissel.fr
14 Rue des Grandes Bosses, 44220 Couëron**



Vos besoins évoluent ?

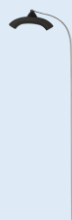

Il est possible de rajouter simplement le bras en inox à votre Cryo 7.

